




## Termômetro Clínico Digital G-Tech Modelos TH198 (Ponta-Flexível)

### Descrição do Produto:

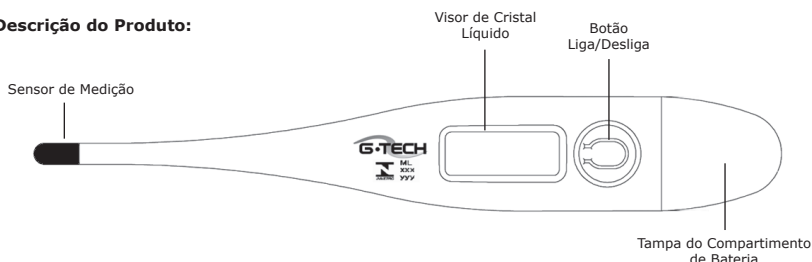

### Características Especiais do Termômetro Clínico Digital G-Tech

- Faixa de medição: de 32,0°C – 43,9°C - Com indicador de temperaturas inferiores ("L") e superiores ("H") à esta faixa de medição.
- Fonte de alimentação: bateria de lítio de 1.5/1.55 V (não recarregável).
- Retenção da temperatura máxima: em cada medição, a temperatura máxima aparece no mostrador, até o aparelho se desligar.
- Sinal sonoro: indica que o aparelho está pronto a ser utilizado ou que a medição terminou.
- Auto-verificação automática: caso a mensagem «ERR» apareça no seu visor significa que há algum problema em sua medição. Não utilize seu termômetro, entre em contato conosco!
- Resultados das medições: expressos em grau Celsius (°C).
- Erro máximo de indicação dos resultados:  $\pm 0,2^\circ\text{C}$  entre 34°C – 42°C a uma temperatura ambiente entre 18°C - 28°C.
- Tempo total da medição da temperatura de 90 a 120 segundos.
- Visor de cristal líquido: é possível visualizar alterações de temperatura de 0.1°C.
- Ponta flexível: pode ser dobrada até o ângulo de 45°.
- Memória: guarda automaticamente a última temperatura medida.
- Desligamento automático: após aproximadamente 10 minutos, para assegurar prolongamento da vida da bateria.

### Informações de Segurança

- Não exponha o dispositivo a temperaturas extremas (superiores a 60°C), umidade, poeira ou luz direta.
- Não deixe o seu termômetro cair. Evite vibrações fortes.
- A ponta flexível não pode ser dobrada num ângulo superior a 45°
- Este termômetro destina-se somente a medir a temperatura corporal.
- O tempo de medição mínimo (até se ouvir o sinal sonoro) deve ser mantido sem exceção.
- Não deixe nunca este termômetro ao alcance das crianças, pois contém peças pequenas que podem ser engolidas (pilha, etc.).
- NUNCA ferva o termômetro!
- Limpe o corpo e a ponta do seu termômetro exclusivamente com pano umedecido em álcool.
- Não desmonte o termômetro, pois assim perderá o direito a garantia!
- O uso deste termômetro não dispensa uma consulta ao seu médico.
- O uso inadequado deste termômetro pode gerar resultados incorretos! Siga corretamente as instruções de uso deste manual.
- Caso tenha dúvidas quanto o seu correto manuseio entre em contato com o nosso Serviço de Atendimento ao Cliente — SAC.
- Recomenda-se remover a bateria do termômetro caso este for ficar sem uso por longos períodos, pois a mesma pode danificá-lo.

### Auto-Verificação Automática

Um teste de verificação do correto funcionamento do Termômetro Clínico Digital G-Tech é automaticamente acionado cada vez que se liga o termômetro. Se este teste detectar uma anomalia (medição incorreta), o mostrador indicará «ERR», tornando impossível a medição. Se tal acontecer o termômetro deverá ser enviado a um Posto Autorizado de Assistência Técnica.





## Como Realizar a Medição de Temperatura

Para ligar o Termômetro Clínico Digital G-Tech, pressione o botão Liga/Desliga localizado ao lado do visor de cristal líquido. Um curto sinal sonoro será ouvido indicando que o termômetro está ligado. O termômetro realiza então um pequeno teste de funcionamento. Se a temperatura ambiente for inferior a 32°C, aparecerão um «L» e um «°C» intermitentes, na parte superior direita do visor. O Termômetro Clínico Digital G-Tech pode agora ser utilizado. Durante a medição, a temperatura verificada aparece continuamente no visor e a letra «°C» aparece piscando. Utilize-o numa das formas abaixo descritas:

- Cavidade Oral (boca): coloque o termômetro numa das bolsas existentes sob a língua, assegurando-se que o sensor de medição está em contato direto com a mesma. Feche a boca e respire regularmente pelo nariz para evitar que a medição seja influenciada pelo ar inalado/ exalado.
- Região Axilar (debaixo do braço): sob o ponto de vista médico, este é um método que pode produzir medições menos precisas. Coloque o sensor debaixo do braço, no centro da axila.

Para prolongar a vida da bateria, desligue o termômetro após cada utilização, pressionando ligeiramente o botão "Liga/Desliga". Se não o fizer, o termômetro se desligará automaticamente passados 10 minutos.

## Como Acessar a Memória

Ao ligar o termômetro mantenha-no pressionado por aproximadamente 3 segundos para que a temperatura registrada na última medição apareça no lado direito do visor acompanhado de um «<M>>» pequeno (que significa memória). Este valor aparecerá por mais 3 segundos, o termômetro entrará no modo de medição e o valor na memória apaga-se.

## Como Trocar a Bateria

Quando o símbolo «▼» (triângulo invertido) aparecer no canto inferior direito do visor é um sinal de que a bateria está descarregada e necessita ser substituída. Proceda da seguinte forma: retire a tampa do compartimento de bateria puxando-a. Substitua a bateria descarregada pela nova, assegurando-se que o sinal + fica para cima.

**Atenção:** as baterias usadas não devem ser descartadas juntamente com o lixo normal. Descarte-as em local apropriado.

## GARANTIA

O Termômetro Clínico Digital G-Tech tem garantia de um ano a contar da data de entrega efetiva dos produtos. A garantia somente será válida mediante apresentação do cupom fiscal com data de compra, nome referência do produto e identificação do revendedor. A garantia não se aplica aos danos provocados por manuseio inadequado, acidentes, inobservância das instruções de manuseio, conservação e operação descritas no manual, ou a alterações feitas no instrumento por terceiros. Qualquer abertura desautorizada do termômetro invalidará esta garantia; não existem componentes internos que necessitem ser manuseados pelo usuário. A bateria, e os danos provocados pelo vazamento da mesma, não estão cobertos pela garantia. A garantia não cobre despesas de envio e retorno para conserto, atos ou fatos provocados pelo mau funcionamento do termômetro e outras despesas não identificadas. O fabricante se reserva do direito de substituir o termômetro defeituoso por outro novo, caso julgue necessário. Sendo o critério de julgamento exclusivo do fabricante. Os reparos efetuados dentro do prazo de garantia não o prorrogam. Todo serviço de manutenção oriundo de peças sensíveis ao desgaste de uso será cobrado a parte, mesmo que o aparelho esteja dentro do prazo de garantia.

Importado por:

## ACCUMED - Produtos Médico-Hospitalares Ltda.

Endereço: Rua São Jorge, nº 119 / Quadra 70 – Lote 19 a 21 - Vila São Luiz – Duque de Caxias - RJ.  
CEP: 25086-110 • CNPJ: 06.105.362/0001-23 • Insc. Est.: 77.701.290  
SAC: Tel.: (21) 2775-8929 • e-mail: sac@accumed.com.br  
Resp. Técnico: Marcos Jordão • CRQ 3ª Região: 03212320  
Reg. Anvisa nº: 80275310002  
Fabricante: Onbo Electronics • Ta Laneg Loong Hwa Chen Bao Na Shin • Shenzhen • China

