

## Alterações de Funcionamento

Se algum imprevisto ocorrer durante o funcionamento do Massageador Pessoal PowerPro G-TECH, por favor, olhe no quadro abaixo:

Problema	Provável Causa	O Quê Fazer
O massageador não funciona.	O plugue não está bem conectado à tomada.	Reinsira o plugue na tomada (verificando a voltagem de ambos).
	O botão de seleção de função está com mau contato.	Mova o botão para cima e para baixo para testar o seu funcionamento.
O ruído do massageador ficou mais alto durante o uso do mesmo.	Tempo de uso consecutivo muito longo.	Desligue o massageador e o deixe sem uso por 30 minutos

## Especificações Técnicas

Tensão Nominal (Voltagem): 110 V ou 220 V

Frequência Nominal: 50Hz

Potência Nominal de Saída: 28W

Dimensões: 48 cm x 20,5cm x 20 cm

Peso: 2 Kg

## Instruções de Uso

Atenção: Antes de utilizar o massageador Pessoal PowerPro G-TECH certifique-se de que o botão de seleção de função do mesmo encontra-se na posição desligado (voltado para baixo) e antes de conectar o plugue a tomada, verifique se as voltagens de ambos são compatíveis, pois a utilização de tomada com voltagem diferente da indicada no plugue invalida a garantia e pode causar dano ou mau funcionamento ao aparelho.

1 - Conecte o plugue na tomada e gire o botão de intensidade de massagem no sentido horário ajustando assim a velocidade de vibração desejada. Neste momento a luz de massagem automaticamente se acenderá.

2 - Pode-se aliar a massagem ao calor, para isso empurre o botão de seleção de função para baixo, e a luz de aquecimento se acenderá. Esta função pode ser utilizada sem a massagem, para isso gire o botão de intensidade de massagem no sentido anti-horário até que a vibração do massageador termine e a luz de massagem se apague.

3 - Pode-se aliar a massagem a luz infravermelha, para isso empurre o botão de seleção de função para cima, e a luz infravermelha se acenderá. Esta função pode ser utilizada sem a massagem, para isso gire o botão de intensidade de massagem no sentido anti-horário até que a vibração do massageador termine e a luz de massagem se apague.

## Manutenção e Limpeza

1 - Guarde o Massageador Pessoal PowerPro G-Tech em local seco, e com baixas temperaturas, distante de objetos perfuro-cortantes, ao abrigo de sol e poeira e longe do alcance de crianças.


2 - Certifique-se de que o massageador Pessoal Power Pro está desligado e desconectado da tomada antes de limpá-lo.

3 - Limpe-o apenas com pano macio seco NUNCA use desinfetantes, detergentes ou outras soluções de limpeza;

4 - JAMAIS tente consertar o massageador por conta própria. Pois qualquer abertura desautorizada do mesmo invalidará o direito à garantia.

5 - Periodicamente cheque o fio do Massageador Pessoal PowerPro G-TECH e veja se ele está íntegro. Caso ele esteja enrolando estique-o e mantenha assim para prevenção de quebras.

## Descrição do Massageador

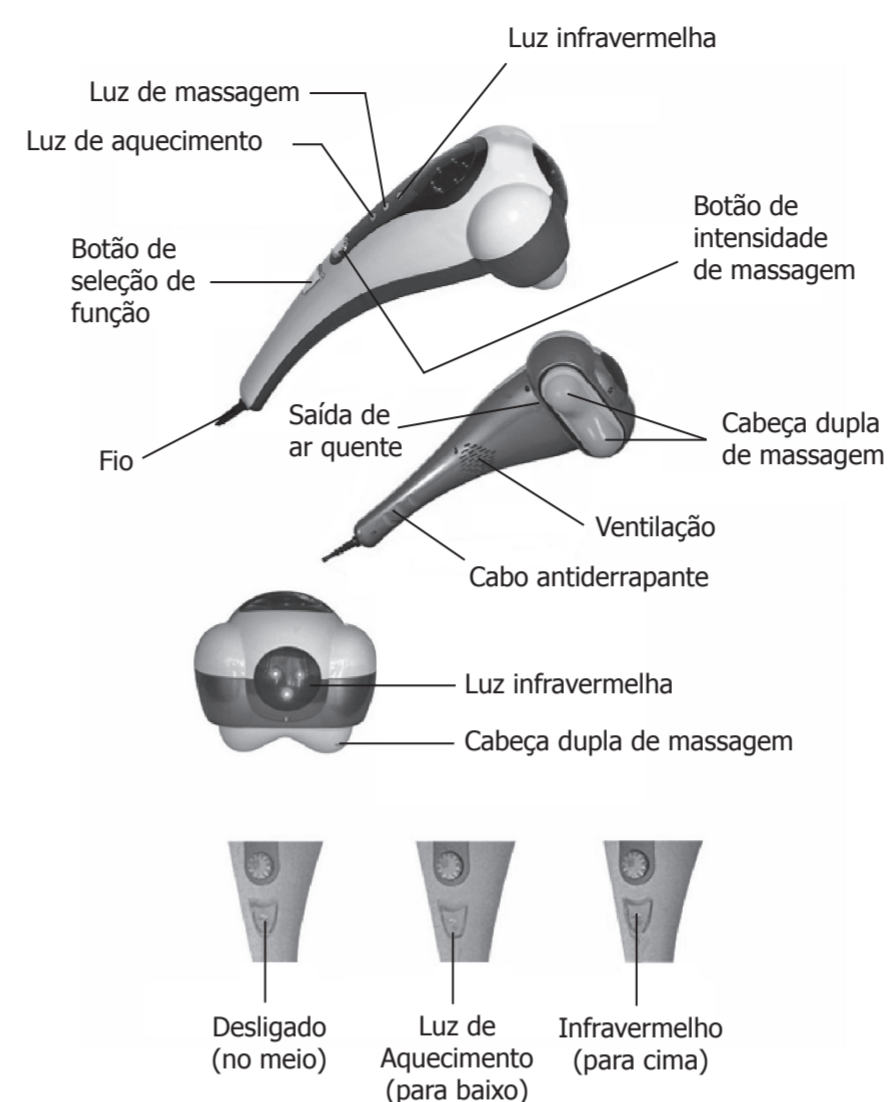

5

2

3

4

# G•TECH



## Massageador Pessoal PowerPro G-TECH

### Manual de Instruções

## Manual de Instruções Massageador Pessoal PowerPro G-TECH

### Introdução

O Massageador Pessoal PowerPro G-TECH utiliza os princípios da alta frequência de vibração, da luz de aquecimento (através de saída de ar quente), da luz infravermelha e o design ergonômico para promover massagem relaxante e revigorante ao seu usuário e também auxilia no alívio de:

- dores causadas pelo cansaço muscular e por esforços;
- espasmos nos ombros causados por dor no pescoço;
- dores causadas pela má circulação, pois auxilia na melhoria da mesma;

Abrangendo uma área maior do seu corpo, a dupla cabeça de massagem combina suavidade e vigor com facilidade no manuseio e baixo ruído.



1

6

## Avisos Importantes

- 1 - Retire o plugue do Massageador Pessoal PowerPro G-Tech da tomada sempre que não for utilizá-lo.
- 2 - Não segure o massageador pelo fio, segure-o sempre no cabo e mantenha-o longe de superfícies aquecidas e/ou pontudas.
- 3 - Desligue o Massageador Pessoal Power Pro G-Tech sempre que não for utilizá-lo.
- 4 - Evite deixar o massageador em funcionamento constante por mais de 20 minutos (sob o risco de superaquecimento do mesmo), caso deseje se massagear por mais tempo faça uma pausa desligando-o e religando-o após uns 30 minutos de repouso.
- 5 - Evite deixar o massageador em contato diretamente com cobertores, colchões e etc para que as frestas de ventilação não sejam bloqueadas e cause superaquecimento do mesmo. Tome cuidado especial também com o bloqueio causado por cabelos!
- 6 - Não utilize o massageador próximo a combustíveis e a fontes de calor.
- 7 - Não utilize o massageador durante o banho ou no banheiro.
- 8 - Não utilize o massageador sobre o corpo molhado. Assim como não o utilize se estiver com as mãos molhadas.
- 9 - Não molhe, mergulhe, lave ou deixe cair água ou outro líquido qualquer no massageador. Em caso de acidentalmente ter caído algum líquido ou água no massageador, pare imediatamente o uso do mesmo.
- 10 - A utilização do Massageador Pessoal PowerPro G-Tech por crianças, idosos e pessoas com necessidades especiais deve ser sempre feito com acompanhamento. **Observação: O uso deste massageador não é indicado para crianças com idade abaixo de 12 anos e por mulheres grávidas.**
- 11 - A massagem promovida pelo Massageador Pessoal PowerPro G-Tech deve ser uma sensação confortável para o usuário. Interrompa o uso deste caso sinta dor ou desconforto ao utilizar o aparelho e entre em contato com seu médico;
- 12 - Não o utilize em locais onde aerossóis estão sendo utilizados.
- 13 - Não utilize o massageador em partes do corpo sensíveis, lesadas (com ferimentos ou queimaduras), com varizes, com baixa circulação sanguínea, anestesiadas ou sem sensação de tato.
- 14 - Siga estritamente as instruções de uso contidas neste manual e não utilize o Massageador Pessoal PowerPro G-Tech de qualquer forma não descrita neste manual (tais como utilizar acessórios não fornecidos pelo fabricante, inserir objetos, inserir as mãos ou abri-lo) sob risco de acidentes e da perda da garantia.

## Termo de Garantia

O Massageador Pessoal PowerPro G-Tech — tem garantia de um ano a contar da data de entrega efetiva dos produtos. A garantia somente será válida mediante apresentação de nota fiscal com data de compra, nome referência do produto e identificação do revendedor. A garantia de um ano não se aplica as partes sensíveis ao desgaste de uso normal. Estas partes têm garantia de noventa dias, também contados a partir da data de entrega efetiva dos produtos. A garantia não se aplica aos danos provocados por manuseio inadequado, acidentes, inobservância das instruções de manuseio, conservação e operação descritas no manual, ou a alterações feitas no instrumento por terceiros. Qualquer abertura desautorizada do Massageador Pessoal PowerPro G-Tech invalidará esta garantia; não existem componentes internos que necessitem ser manuseados pelo usuário. Danos causados por pane elétrica ou utilização de tomadas com voltagem diferente da especificada no produto não estão cobertos pela garantia. A garantia não cobre despesas de envio e retorno para conserto, atos ou fatos provocados pelo mau funcionamento do aparelho e outras despesas não identificadas. O fabricante se reserva do direito de substituir o Massageador Pessoal PowerPro G-Tech defeituoso por outro novo, caso julgue necessário. Sendo o critério de julgamento exclusivo do fabricante após análise técnica. Os reparos efetuados dentro do prazo de garantia não prorrogam o mesmo. Todo serviço de manutenção oriundo de peças sensíveis ao desgaste de uso será cobrado à parte, mesmo que o aparelho esteja dentro do prazo de garantia.