




INSTRUÇÕES DE USO

Garrote Premium - Modelo Adulto

Indicação de Uso

O garrote é um cinto flexível utilizado durante a coleta de sangue para facilitar a localização das veias, tornando-as proeminentes. Deve ser colocado no braço do paciente próximo ao local da punção, sendo que o fluxo arterial não poderá ser interrompido. Para tal, basta verificar a pulsação do paciente. Mesmo garroteado, o pulso deverá continuar palpável. Deve-se retirar ou afrouxar o garrote logo após a venipunção, pois o garroteamento prolongado pode acarretar alterações nas análises (por exemplo: nas análises do cálcio).

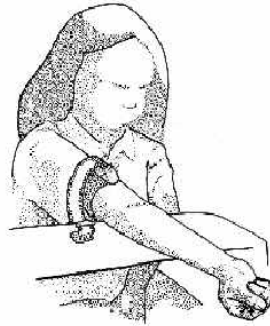

Conteúdo

Cada embalagem plástica contém 01 unidade do Garrote Premium Modelo Adulto.



Figura 1: Garrote Premium


Especificações e Características Técnicas

- Faixa de flexibilidade: 1:1.5 - 1:2.0
- Reversão da flexibilidade: $\geq 90\%$
- Tensão: $\geq 50\text{N}$
- Composição: plástico ABS (fecho) e elástico
- Livre de látex
- Dimensões:


Modelo Adulto: Comprimento: $400\text{mm} \pm 10\text{mm}$; Largura: $25\text{mm} \pm 1\text{mm}$

MODO DE USO


1. Abra a embalagem e aperte o fecho do garrote abrindo-o para cima e posicione em torno do braço.

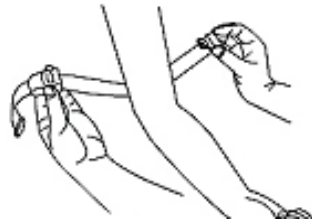


2. Insira a ponta no fecho conforme ilustrado.

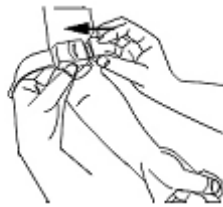

3. Puxe a ponta do elástico até obter a tensão desejada.

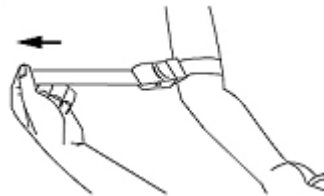

4. Para liberar a pressão do braço basta soltar o garrote pressionando um botão na parte de cima do garrote.

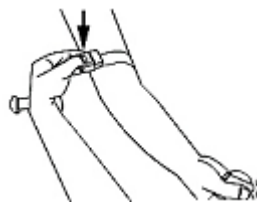

Condições Especiais de Armazenamento e Conservação

- Temperatura de armazenagem recomendada: 0°C a 40°C
- Não exponha o dispositivo a temperaturas e umidades extremas (acima de 80%)
- Não puxe o elástico acima da tensão máxima ou ocorrerá a quebra do garrote.
- Limpe o dispositivo com um pano macio e levemente umedecido com água. Não use produtos químicos.

Advertências e/ ou Precauções a serem adotadas

- Não mantenha o braço apertado por muito tempo
- Não puxe o elástico acima da tensão máxima ou ocorrerá a quebra do garrote.
- Não exponha o dispositivo a temperaturas e umidades extremas (acima de 80%)

Informações adicionais

- A versão atualizada das instruções de uso do Garrote Premium no formato não impresso pode ser encontrada no endereço eletrônico www.accumed.com.br, disponível na internet.
- Para obter, as instruções de uso do Garrote Premium no formato impresso, sem custo adicional, entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) da Accumed através do telefone 0800-052-1600.
- A versão das instruções de uso, disponível na internet, é correspondente ao ano de fabricação do produto adquirido.

Fabricado por:

TNQ Industrial Co., Ltd.

301, No. 20, Aimin Road, Nancun Town, Panyu District, Guangzhou City, Guangdong Province, China

Importado e distribuído por:

Accumed Produtos Médico Hospitalares Ltda.

Rodovia Washington Luiz, 4370 - Galpão G, H, J, K e L - Vila São Sebastião - Duque de Caxias – RJ - CEP: 25055-009

Responsável Técnico: Marcos Eduardo da Silva Jordão CRQ/RJ 3ª Região: 03212320

Declarado isento de registro pelo Ministério da Saúde

Notificação ANVISA/MS nº: 80275319001

Rev01_140121