



## Avisos Importantes

- 1 - Retire o plugue do Massageador Pessoal IR-Magnet PLUS G-Tech da tomada sempre que não for utilizá-lo.
- 2 - Não segure o Massageador pelo fio, segure-o sempre no cabo e mantenha-o longe de superfícies aquecidas e/ou pontudas.
- 3 - Desligue o Massageador Pessoal IR-Magnet PLUS G-Tech sempre que for trocar os seus acessórios.
- 4 - Evite deixar o massageador em funcionamento constante por mais de 20 minutos (sob o risco de superaquecimento do mesmo), caso deseje se massagear por mais tempo faça uma pausa desligando-o e religando-o após uns 5 minutos de repouso.
- 5 - Evite deixar o massageador em contato diretamente com cobertores, colchões e etc para que as frestas de ventilação não sejam bloqueadas e cause superaquecimento do mesmo. Tome cuidado especial também com o bloqueio causado por cabelos!
- 6 - Não utilize o massageador durante o banho.
- 7 - Não molhe, mergulhe, lave ou deixe cair água ou outro líquido qualquer no massageador. Em caso de acidentalmente ter caído algum líquido ou água no massageador, pare imediatamente o uso do mesmo.
- 8 - Não o utilize em ambientes externos tais como: piscinas, saunas, varandas, entre outros, onde possa haver incidência de raios solares, mormaço, sereno e chuva.
- 9 - A utilização do Massageador Pessoal IR-Magnet PLUS G-Tech por crianças, idosos e pessoas com necessidades especiais deve ser sempre feito com acompanhamento. **Observação:** O uso deste massageador não é indicado para crianças com idade abaixo de 12 anos.
- 10 - A massagem promovida pelo Massageador Pessoal IR-Magnet PLUS G-Tech deve ser uma sensação confortável para o usuário. Interrompa o uso deste caso sinta dor ou desconforto ao utilizar o aparelho e entre em contato com seu médico;
- 11 - Não o utilize em locais onde aerossóis estão sendo utilizados.
- 12 - Não utilize o massageador em partes do corpo sensíveis, lesadas (com ferimentos ou queimaduras), com varises, com baixa circulação sanguínea, anestesiadas ou sem sensação de tato.
- 13 - Siga estritamente as instruções de uso contidas neste manual e não utilize o Massageador Pessoal IR-Magnet PLUS G-Tech de qualquer forma não descrita neste manual (tais como utilizar acessórios não fornecidos pelo fabricante, inserir objetos ou abri-lo) sob risco de acidentes e da perda da garantia.

## Manutenção e Limpeza

- 1 - Guarde o Massageador Pessoal IR-Magnet PLUS G-Tech em local seco e com a temperatura ambiente, distante de objetos perfuro-cortantes, ao abrigo de sol e poeira e longe do alcance de crianças.
- 2 - Certifique-se de que o Massageador Pessoal IR-Magnet PLUS G-Tech está desligado e desconectado da tomada antes de limpá-lo.
- 3 - Limpe-o apenas com pano macio seco **NUNCA** use desinfetantes, detergentes ou outras soluções de limpeza.
- 4 - **JAMAIS** tente consertar o massageador por conta própria. Pois qualquer abertura desautorizada do mesmo invalidará o direito à garantia.
- 5 - Periodicamente cheque o fio do Massageador Pessoal IR-Magnet PLUS G-TECH e veja se ele está íntegro. Caso ele esteja enrolando estique-o e mantenha assim para prevenção de quebras.

## Garantia

O Massageador Pessoal IR-Magnet PLUS G-Tech tem garantia de um ano a contar da data de entrega efetiva dos produtos. A garantia somente será válida mediante apresentação do cupom fiscal com data de compra, nome referência do produto e identificação do revendedor. A garantia de um ano não se aplica as partes sensíveis ao desgaste de uso normal. Estas partes têm garantia de noventa dias, também contados a partir da data de entrega efetiva dos produtos. A garantia não se aplica aos danos provocados por manuseio inadequado, acidentes, inobservância das instruções de manuseio, conservação e operação descritas no manual, ou a alterações feitas no instrumento por terceiros. Qualquer abertura desautorizada do aparelho invalidará esta garantia; não existem componentes internos que necessitem ser manuseados pelo usuário. Danos causados por pane elétrica ou utilização de tomadas com voltagem diferente da especificada no produto não estão cobertos pela garantia. A garantia não cobre despesas de envio e retorno para conserto, atos ou fatos provocados pelo mau funcionamento do aparelho e outras despesas não identificadas. O fabricante se reserva do direito de substituir o massageador defeituoso por outro novo, caso julgue necessário. Sendo o critério de julgamento exclusivo do fabricante. Os reparos efetuados dentro do prazo de garantia não prorrogam o prazo de garantia. Todo serviço de manutenção oriundo de peças sensíveis ao desgaste de uso será cobrado a parte, mesmo que o aparelho esteja dentro do prazo de garantia.



## Massageador Pessoal IR-Magnet PLUS

Bivolt

Importado por:

**ACCUMED PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA.**


Rodovia Washington Luiz, 4370 - Galpão L/H - Vila São  
 Sebastião Duque de Caxias - RJ • CEP: 25055-009  
 E-mail: sac@accumed.com.br • CNPJ: 06.105.362/0001-23  
 Suporte: 0800 052 1600 • Comercial: 21 2126 1600  
 Resp. Técnico: Marcos Eduardo Jordão CRQ3ªReg.: 03212320  
 Fabricado na China

Produto para uso pessoal sem fins terapêuticos.  
 Isento de registro na ANVISA





## Descrição do Produto

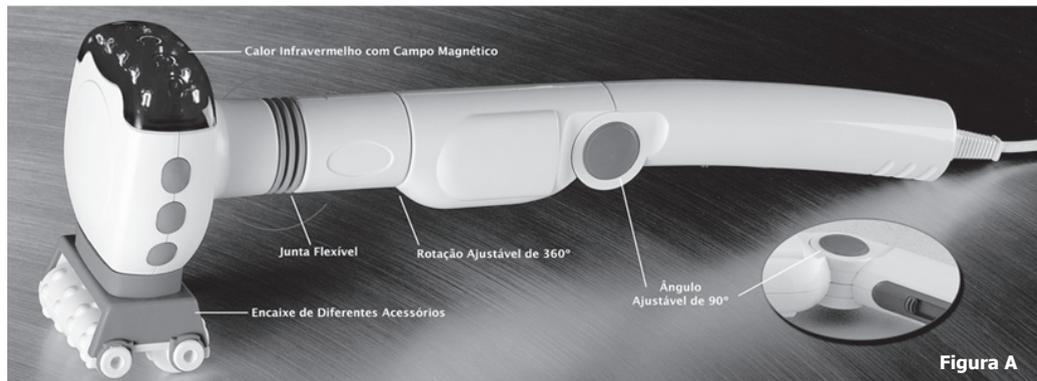

## Instruções de Uso

1 - Antes de conectar o plugue do massagador a tomada certifique-se de o mesmo se encontra na posição "0", ou seja desligado. Antes de ligar o Massagador Pessoal IR-Magnet PLUS G-Tech verifique se as voltagens da tomada e do massagador são compatíveis, pois a utilização de tomada com voltagem diferente da indicada no plugue do massagador invalida a garantia e pode causar dano ou mau funcionamento ao aparelho.

2 - O massagador pessoal IR-Magnet PLUS G-Tech possui um controle com três funções: massagem (1), luz infravermelha (2) e massagem com luz infravermelha (3).

- Massagem: possibilita escolher a massagem adequada para cada parte do corpo. Basta colocar o acessório selecionado e massagear onde preferir: braços, pernas, costas, coxas, pescoço, ombros, etc. A massagem pode ser feita sobre a roupa, mas é mais eficaz diretamente sobre a pele;

- Luz infravermelha – Geração de calor que proporciona uma sensação de relaxamento e uma massagem mais suave

- Massagem com luz infravermelha: deixe o botão na posição (3) e aproveite a combinação do calor penetrante com a massagem vibratória. Massagem com calor: antes de usar o aparelho na posição calor (1), verificar a temperatura da placa de calor. A temperatura

pode ser controlada desligando e ligando o aparelho de vez em quando.

3 - Na opção apenas massagem podem ser adaptados ao massagador seis acessórios intercambiáveis que proporcionam os diferentes tipos de massagem abaixo:

- Roletas com pontos de pressão: pequenos pontos de pressão nos roletas vão aliviar a fadiga do corpo.



- Massagem por sucção: provoca ligeira sensação de vácuo que tem efeito benéfico apertando a pele.

- Dois pontos de pressão: design especialmente desenvolvido com 2 pontos de pressão para massagear todo o corpo, leva ondas suaves para os ombros, braços e pernas.



- Massagem para o couro cabeludo: começando na base do couro cabeludo, chegar até o topo da cabeça e depois reverter a direção para uma massagem revigorante.

- Massagem com múltiplos pontos de pressão: sensação de relaxamento por todo o corpo.



- Ponto único de pressão: a saliência propicia massagem concentrada levando ondas suaves para áreas mais extensas do corpo como pernas, quadris e costas.

4 - Com o Massagador Pessoal IR-Magnet PLUS G-Tech a massagem pode ser ajustada ao ângulo de sua preferência. Para tal pressione e mantenha pressionado o botão circular localizado no cabo enquanto, conforme ilustrado abaixo. Solte o botão quando ajustar o cabo ao ângulo desejado e inicie sua massagem. (Veja detalhe em destaque na figura A)

5 - Quando terminada a massagem guarde o Massagador Pessoal IR-Magnet PLUS G-Tech em local seco e com temperatura ambiente, distante de objetos perfuro-cortantes, ao abrigo de sol e poeira e longe do alcance de crianças.

