

# MANUAL DE INSTRUÇÕES




## BALANÇA DIGITAL PARA USO PESSOAL G-TECH GLASS11

Leia as instruções deste manual com atenção antes de usar a balança.

### 1 - Fonte de Alimentação

A Balança G-Tech Glass 11 funciona com 2 pilhas AAA 1,5V. Certifique-se de que as polaridades +/- estejam posicionadas adequadamente.

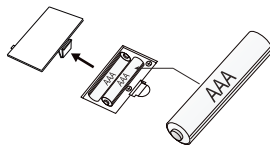

**IMPORTANTE:** Se a balança estiver sendo usada pela primeira vez ou se ela foi mudada de posição, pressione o centro da balança para ligá-la e aguarde até que apareça o "0,0" no visor. Este procedimento é para o ajuste do zero. Em seguida, suba na balança diretamente para pesagem. Não são necessários ajustes adicionais, desde que a balança permaneça no local original. Basta pisar na balança para posterior pesagem.

### 2- Procedimento de Pesagem

Passo 1: Coloque a balança em uma superfície rígida e plana. Evite colocá-la sobre superfícies macias e carpetes.

Passo 2: Se a balança estiver sendo usada pela primeira vez ou se ela tiver sido mudada de local, pressione o centro da balança para ligá-la e aguarde até que apareça o "0,0" no visor. Este procedimento é para o ajuste automático do zero.

Passo 3: Suba na plataforma da balança e permaneça parado. Aguarde por alguns segundos até que o valor do peso apareça "piscando" no visor, indicando o fim da medição. Seu peso será exibido por 10 segundos e a balança desligará automaticamente.

**Se você quiser medir o peso novamente, por favor, desça, e então, suba na plataforma da balança novamente.**



### 3-Especificações Técnicas

- Unidade de medida: kg
- Divisão: 0,1 kg
- Faixa de medição: 5kg a 180kg
- Alimentação: 2 pilhas AAA de 1,5V
- Tecnologia: Ativação automática ao subir na balança
- Indicador de Bateria fraca
- Indicador de sobrecarga
- Dimensões da balança: 285x285x24 mm
- Tamanho do LCD: 75x30 mm
- Plataforma em vidro temperado de 5 mm

### 4-Ativação

A Balança Digital G-TECH GLASS11 possui a tecnologia de ativação automática ao subir na balança. Pise diretamente na plataforma para obter leitura instantânea.

### 5. Desligamento Automático

A balança desligará automaticamente após 10 segundos, se não estiver em uso.

## 6. Indicador de Sobrecarga

Caso a capacidade máxima de 180kg da balança seja ultrapassada, a mensagem “oL” aparecerá na tela. Por favor desça da balança para evitar danos nos sensores.



## 7-Indicador de bateria fraca

Quando o visor LCD indicar “Lo”, abra o compartimento de pilhas e substitua as pilhas usadas por novas.



## 8. Recomendações para Uso

1. Por favor, NÃO coloque a balança em carpete ou superfície macia.
2. Se a balança não for utilizada por um longo período, remova as pilhas.
3. Limpe a balança com um pano levemente úmido e NÃO use agentes de limpeza químicos/abrasivos.
4. NÃO mergulhe a balança em água.

## 9 - Garantia

A Balança Digital G-TECH Glass11 tem garantia de um ano a contar da data de entrega efetiva dos produtos. A garantia somente será válida mediante apresentação do cupom fiscal com data de compra, nome referência do produto e identificação do revendedor. A garantia não se aplica aos danos provocados por manuseio inadequado, acidentes, inobservância das instruções de uso, conservação e operação descritas no manual, ou a alterações feitas no instrumento por terceiros. Qualquer abertura desautorizada do termômetro invalidará esta garantia; não existem componentes internos que necessitem ser manuseados pelo usuário. A bateria, e os danos provocados pelo vazamento da mesma, não estão cobertos pela garantia. A garantia não cobre despesas de envio e retorno para conserto, atos ou fatos provocados pelo mau funcionamento da balança e outras despesas não identificadas. O fabricante se reserva do direito de substituir a balança defeituosa por outra nova caso julgue necessário. Sendo o critério de julgamento exclusivo do fabricante. Os reparos efetuados dentro do prazo de garantia não o prorrogam. Todo serviço de manutenção oriundo de peças sensíveis ao desgaste de uso será cobrado a parte, mesmo que o aparelho esteja dentro do prazo de garantia.

## Assistência técnica

Para saber onde encontrar um posto autorizado de assistência técnica, acesse nosso site: [www.accumed.com.br](http://www.accumed.com.br) ou entre em contato com nosso SAC: 0800 052 1600

Importado por: Accumed Produtos Médico Hospitalares Ltda.  
Avenida Civit I, 1795, Galpão A, Módulo 4 e 5, Sala 34 – Barro Branco  
Serra – ES CEP: 29170-740 / CNPJ: 06.105.362/0004-76  
SAC: 0800-052-1600 / Comercial: (21) 2126-1600 – site: [www.accumed.com.br](http://www.accumed.com.br)  
Responsável Técnico: Marcos Eduardo Jordão CRQ 3º Reg.: 03212320  
Fabricado na China - Declarado Isento de Registro/Cadastro pela ANVISA/MS  
Produto para uso pessoal, sem fins terapêuticos/diagnósticos  
Rev01\_190822