

Termo de Garantia

A balança digital para uso pessoal tem garantia de um ano a contar da data de entrega efetiva dos produtos. A garantia somente será válida mediante apresentação do cupom fiscal com data de compra, nome referência do produto e identificação do revendedor. A garantia de um ano não se aplica as partes sensíveis ao desgaste de uso normal. Estas partes têm garantia de noventa dias, também contados a partir da data de entrega efetiva dos produtos. A garantia não se aplica aos danos provocados por manuseio inadequado, acidentes, inobservância das instruções de manuseio, conservação e operação descritas no manual, ou a alterações feitas no instrumento por terceiros. Qualquer abertura desautorizada do aparelho invalidará esta garantia; não existem componentes internos que necessitem ser manuseados pelo usuário. As baterias, e os danos provocados por vazamento destas, não estão cobertas pela garantia. A garantia não cobre despesas de envio e retorno para conserto, atos ou fatos provocados pelo mau funcionamento do aparelho e outras despesas não identificadas. O fabricante se reserva do direito de substituir a balança defeituosa por outra nova, caso julgue necessário. Sendo o critério de julgamento exclusivo do fabricante. Os reparos efetuados dentro do prazo de garantia não prorrogam o prazo de garantia. Todo serviço de manutenção oriundo de peças sensíveis ao desgaste de uso será cobrado a parte, mesmo que o aparelho esteja dentro do prazo de garantia. As calibrações periódicas da balança não estão cobertas pela garantia e serão cobradas a parte.

Especificações Técnicas

Capacidade: 200 kg
Divisão: 0,05 kg
Faixa de medição: 5 - 200 kg
Unidade de medição: kg
Plataforma de vidro temperado
Dimensões da balança: 30x30x2 cm
Dimensões do visor: 75x30mm
Ativação automática ao subir na balança
Desligamento automático
Indicador de sobrecarga e desligamento automático

Assistência Técnica

Para saber onde encontrar um posto de assistência técnica autorizada, acesse nosso site: www.accumed.com.br ou entre em contato com nosso SAC: 0800 052 1600

Regularizado por: ACCUMED PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA.
Rodovia Washington Luiz, 4370 Gp: G, H, J, K e L - Vila São Sebastião
Duque de Caxias - RJ, CEP: 25055-009
CNPJ 06.105.362/0001-23 Suporte: 0800 052 1600 Comercial: 21 2126 1600
Site: www.accumed.com.br

Resp. Técnico: Marcos Eduardo Jordão CRQ 3ª Reg.: 03212320
Produto para uso pessoal sem fins terapêuticos
Fabricado na China - Isento de registro na Anvisa

REV09_090824

Balança Digital Para Uso Pessoal



Modelo **Glass 200**




Leia este Manual de Instruções antes de utilizar a sua Balança Digital para uso pessoal G-TECH Glass 200

MANUAL

Sua nova balança eletrônica pessoal, foi projetada para indicar com precisão o seu ganho ou perda de peso e funcionará bem por vários anos desde que utilizada conforme as instruções desse manual.


Modelo da Bateria

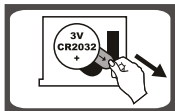

A balança digital para uso pessoal G-Tech modelo Glass 200 utiliza uma bateria de lítio de 3V (CR2032).

Por favor, remova a película de isolamento localizado embaixo da bateria, antes de usar a balança.

Trocando a Bateria

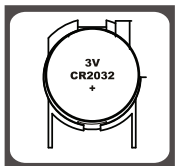

Para trocar a bateria, abra o compartimento da bateria na parte de trás da balança e remova gentilmente a bateria descarregada;

Insira a nova bateria de lítio do tipo CR2032 (incluídas). Não esqueça de remover a película de isolamento antes de usar.

Após a inserção da nova bateria, feche a tampa do compartimento de baterias.

Por favor preste atenção à polaridade da bateria no momento da instalação.

Observação:

1. Retire a bateria se a balança não for ser utilizada por muito tempo, sob o risco de ocorrer vazamento e danificar a balança;
2. Quando as baterias estiverem descarregadas, estas devem ser descartadas obedecendo a legislação pertinente ao descarte de materiais tóxicos. Na maioria dos casos você pode entregar as pilhas para um centro de reciclagem local

Realizando a Medição



Passo 1: Posicione a balança em uma superfície plana e nivelada. Não deve ser colocar sobre tapetes e superfícies macias.

Se a balança estiver sendo usada pela primeira vez ou se ela foi mudada de posição, pressione o centro da balança para ligá-la e aguarde até que apareça o "0.0" no visor. Este procedimento é para o ajuste do zero.




Passo 2: Suba gentilmente na balança e após este procedimento, ela ligará automaticamente.

Permaneça sobre a balança sem se mover e aguarde até que os valores do seu peso se estabilizem no visor, e então o seu peso será mostrado no visor.


Os valores serão exibidos por 10 segundos, então a balança desligará automaticamente.

Desligamento Automático

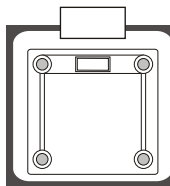

Ao descer da balança ela desligará automaticamente após 10 segundos.

Indicador de Sobrecarga

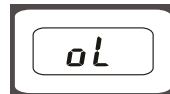

No visor aparecerá a mensagem "oL" caso a capacidade máxima da balança seja ultrapassada.

Por favor desça da balança para evitar danos.

Indicador de Bateria Fraca



A bateria está fraca. Instale bateria nova.

Recomendações para Uso e Cuidados

1. Não posicione a balança sobre tapetes ou carpetes. A plataforma de vidro se torna escorregadia quando molhada. Mantenha-a sempre seca!
2. Mantenha-se de pé e imóvel durante a pesagem.
3. NÃO bata, choque ou derrube a balança. Evite impactos, pois é um instrumento de precisão.
4. Limpe a balança com um pano úmido e evite que entre água nela. NÃO use agentes de limpeza químicos/abrasivos.
5. Mantenha a balança em local arejado e seco.
6. Sempre mantenha sua balança em posição horizontal.
7. Não suba na balança com os pés molhados, pois existe o risco de danificar o sistema como também de escorregar. Mantenha a balança longe de locais com água;
8. Se a balança não ligar, verifique se a bateria está instalada ou se sua energia está baixa. Insira-a novamente ou substitua por nova bateria.
9. Esta balança foi projetada para uso pessoal e doméstico, não devendo ser usada para fins de diagnóstico.
10. Esta balança é para uso doméstico para medição do peso e não para uso comercial ou qualquer outra finalidade.